

Emis par le service:	Approuvé par:	Date:	Révision:	Page:
MKT	A. Schreyer	30.09.2016	2	1

Conseils pour l'emploi :

- Les Turbines, contre-angles et pièce à main doivent être en parfait état.
- Introduire les instruments soigneusement et sans forcer dans la pince de serrage. Les instruments miniaturisés doivent être serrés dans la pince jusqu'à l'extrémité de leur partie cylindrique.
- La force de pression de travail se situe entre 0.3 et 2 N (30-200 p). Une pression exagérée doit absolument être évitée.
- Respecter absolument les vitesses de rotation conseillées sur l'emballage et dans le tableau ci-joint.
- Lors de la préparation, éviter absolument tout blocage ou effort de levier.
- Eliminer immédiatement les instruments tordus ou ne tournant plus de manière concentrique.
- Assurer un refroidissement suffisant (au minimum 50 ml/min) sur la partie travaillante, une déviation du spray risquent de provoquer des lésions d'origine thermique.

Recommandations pour l'hygiène :

- Avant leur première utilisation et immédiatement après usage, les instruments doivent être désinfectés, nettoyés, séchés et stérilisés.
- Respecter les temps et mode de désinfection ainsi que les températures de stérilisation.
- Avant la stérilisation, placer les instruments dans des récipients adéquats.
- Après la stérilisation, conserver les instruments à l'abri de la poussière sur des supports ou dans des récipients. Les instruments de chirurgie seront conservés dans des récipients fermés.