

Emis par le service:	Approuvé par:	Date:	Révision:	Page:
MKT	A. Schreyer	24.04.2017	2	1

Anwendungshinweise :

- Turbine, Hand- und Winkelstück müssen sich in einem technisch einwandfreien befinden.
- Die Instrumente sind vorsichtig und ohne Gewaltanwendung in das Winkelstück einzusetzen. Miniaturinstrumente nur bis zum Ende zylindrischen Teils einspannen.
- Die Anpresskraft liegt zwischen 0.3-2N (30-200 p). Ein zu starker Druck muss unbedingt vermieden werden.
- Die auf den beiliegenden Tabellen und der Verpackung empfohlenen Drehzahlen sind unbedingt einzuhalten
- Während der Präparation zu hohe Anpresskraft sowie Verkanten und Hebeln unbedingt vermieden
- Ausreichende Wasserspraykühlung (min 50 ml/min) am Arbeitsteil sicherstellen.

Hygiene-Empfehlungen :

- Vor dem Einsatz an Patienten sind Schleifinstrumente zu desinfizieren, zu trocknen und zu sterilisieren
- Desinfektionszeiten und -arten sowie Sterilisationstemperaturen sind zu befolgen
- Vor dem Sterilisieren, die Instrumente in geeignete Behälter legen
- Die Instrumente nach der Sterilisation staubfrei in Ständer und Schalen aufbewahren. Chirurgische Instrumente in geschlossenen Behältern aufbewahren.